		ANEXO INSTRUCTIVO USO DE TAPABOCAS – MASCARILLA RESPIRATORIA			
PROCESO	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL			Página 1 de 2	
Código	En revisión	Versión	1	Vigencia	Marzo 2020

1. OBJETIVO

Emitir las recomendaciones para el uso correcto del tapabocas (mascarilla respiratoria) como medida de prevención para COVID 19

2. ALCANCE

Aplica para todos los empleados directos, temporales, contratista y visitantes de AGAC.

3. GENERALIDADES

El uso de tapabocas en ambientes públicos podría reducir la probabilidad de transmisión. La evidencia, indica que una parte importante de la transmisión se da a partir de personas asintomáticas o pre-sintomáticas.



El uso del tapabocas no debe reemplazar el distanciamiento social. El tapabocas es una medida complementaria con sinergia en acciones de prevención.

Cuando usar la mascarilla

- Siempre que este en espacios públicos o espacios compartidos (vía pública, vehículos de transporte con otros ocupantes y en especial en el transporte público, supermercados, plazas de mercado, bancos, almacenes, oficinas compartidas, lugares con afluencia de público, entre otros).
- Siempre que presente síntomas respiratorios o de posible infección respiratoria (fiebre, tos, estornudos, secreción nasal)
- Es mandatorio en grupos de riesgo (personas adultas mayores de 70 años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas).

Cómo usar el tapabocas (mascarilla)

- Lávese las manos con agua y jabón antes de manipular el tapabocas
- Abra el tapabocas (mascarilla) y ajuste la forma de ser necesario
- Coloque el tapabocas (mascarilla) por debajo de la barbilla (mentón)
- Cúbrase la boca y la nariz con el tapabocas (mascarilla) y no lo vuelva a tocar hasta que se lo retire
- Ajuste y evite fugas de aire
- Cuando la mascarilla este húmeda es aconsejable cambiarla
- Retírese el tapabocas sin tocar la parte delantera para no contaminarla. Hágalo de los elásticos laterales
- Lávese las manos siempre después de quitárselo
- Deseche el tapabocas en bolsas de basura, no los arroje en otros lugares

 		ANEXO INSTRUCTIVO USO DE TAPABOCAS – MASCARILLA RESPIRATORIA			
PROCESO	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL			Página 2 de 2	
Código	En revisión	Versión	1	Vigencia	Marzo 2020

- Los tapabocas desechables no deben ser reusados y deben ser cambiados cada ocho horas en personas sanas
- Los tapabocas de tela deben ser lavados antes de cada uso
- Los tapabocas son individuales, no deben ser compartidos con otras personas

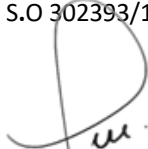
Medidas especiales personal de Salud

- El personal de salud debe de utilizar mascarillas de alta eficiencia N95
- Esta mascarilla se utilizará una por turno, una vez concluida dicha jornada la mascarilla debe ser desechada.
- Si durante el turno, la mascarilla sufre deterioro o contaminación con material biológico, esta debe desecharse y reemplazarse por una nueva.

Uso apropiado y cuidados de la mascarilla N95

- Debe ajustarse a la cara de manera que forme un sello hermético cubriendo completamente boca y nariz
- Debe ajustarse lo mejor posible al contorno facial, de otra manera la mascarilla pierde efectividad y no se garantiza que esta actué como una barrera protectora frente al virus de la influenza
- Si la mascarilla tiene doble resorte, los dos deben quedar perfectamente ajustados en la cabeza
- El personal asistencial debe lavarse las manos antes e inmediatamente después de retirarse la mascarilla
- La mascarilla debe ser cuidadosamente almacenada entre los usos, en bolsa apropiada ó en su empaque original
- La mascarilla por ningún motivo debe salir del centro asistencial
- La mascarilla es personal e intransferible
- Se debe quitar y desechar bajo las normas de bioseguridad establecidas

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	FECHA
1	Elaboración	7 de Abril de 2020

ELABORADO/ACTUALIZADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Juan David Vélez Villa Cargo: Médico Esp. S.O Licencia S.O 302393/15 Firma: 	Nombre: Cargo: Firma:	Nombre: Cargo: Firma:
Fecha: 07/04/2020	Fecha: DD/MM/AAAA	Fecha: DD/MM/AAAA